


CÁPSULAS MONODOSIS

Para carga limpia y sencilla. Las Cápsulas Monodosis pueden ser prellenadas, almacenadas en el Depósito, e insertadas en el Depósito antes de la operación. De esta manera los pacientes tienen su dosis diaria almacenada y transportable. Las Cápsulas Monodosis son aptas para las flores de cáñamo molidas. Los líquidos pueden emplearse con el Tampón disponible de forma opcional.*

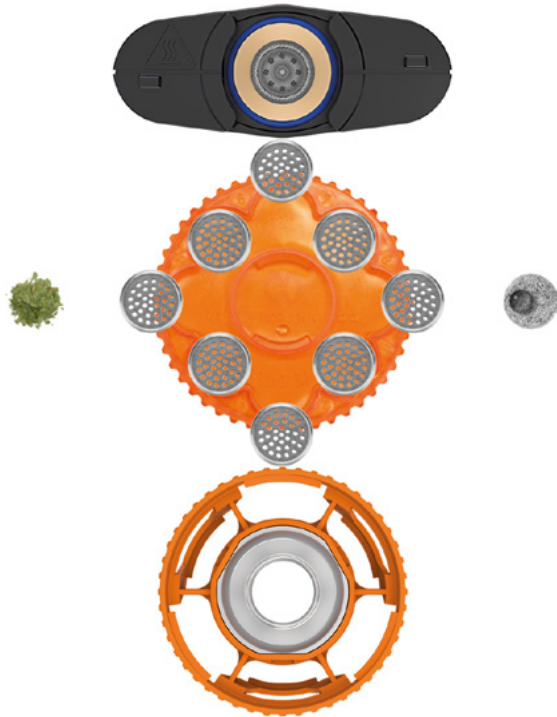

También compatible con el **VOLCANO MEDIC 2** en combinación con el Adaptador de Cápsula Monodosis **MEDIC VALVE**.

*Los cannabinoides disueltos en alcohol sólo son aptos para el **VOLCANO MEDIC 2**.

FABRICANTE

TIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFIKAT



Certificate

No. Q5 063179 0067 Rev. 03

Holder of Certificate: STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Facility(ies): STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY
see Scope of Certificate

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2018
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuv-sud.com/qa-cert/qcert-Q5_063179_0067_Rev_03

Report No.: 713211153
Valid from: 2021-11-21
Valid until: 2024-11-20

Date: 2021-11-19

C. Dicks
Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Fabricante certificado
Gestión de calidad ISO 13485

© by STORZ & BICKEL GmbH - VMAL-4D-036 02-2024 - Reservar sujeto a modificaciones - Todos los derechos reservados



VAPORMED

Inhalación de
cannabis médico

Volcano
MEDIC 2

Mighty⁺
MEDIC



Calidad certificada
Producto médico ISO 60601

USO PREVISTO

El **VOLCANO MEDIC 2** y el **MIGHTY+ MEDIC** están previsto para vaporización y subsecuentemente para inhalación de cannabinoides. El acierto es la aplicación de ingredientes activos en el cuerpo humano a través de los alvéolos para una indicación médica apropiada. Este es utilizable para la aplicación inhalatoria temporaria de cannabinoides prescrito por un médico para el uso en el hogar o en un hospital.

EFICIENTE

La aplicación inhalatoria de cannabinoides es por lejos el método preferido para la toma de cannabinoides. Una de las razones es la rapidez en hacer efecto. Ambos, el **VOLCANO MEDIC 2** y el **MIGHTY+ MEDIC** aseguran una efectiva inhalación. Los cannabinoides son vaporizados por aire caliente, sin combustión. Consecuentemente, no se generan sustancias nocivas de combustión. Por ello no se generan sustancias nocivas resultantes de la combustión. Los valores de referencia medidos en estudios dan como resultado que al menos 1/3 de los cannabinoides empleados en el equipo llega al torrente sanguíneo.

Los Inhaladores **VAPORMED** han sido utilizados en numerosos estudios médicos y han establecido su reputación como inhaladores medicinales certificados para canna-binoides, con licencia para Europa, Canadá y otros países.*

*Más información en www.vapormed.com

GLOBO DE VÁLVULA MEDIC VALVE MEDICINAL Y TRANSPORTABLE

El Globo de Válvula de recambio proporciona una gran libertad de movimiento y la aplicación independiente del dispositivo básico. La inhalación fuera del Globo de Válvula es confortable y prácticamente no opone resistencia. En el **VOLCANO MEDIC 2** existe además la posibilidad de inhalar directamente desde un Tubo flexible conectado.

El **MIGHTY+ MEDIC** es el primer inhalador portátil con homologación sanitaria. Emplea una calefacción combinada de aire y radiación que garantiza una vaporización eficiente desde la primera inhalación.

El Vaporizador **MIGHTY+ MEDIC** se caracteriza por su sencillo manejo. Las dos baterías recargables de alto rendimiento garantizan una amplia duración de uso y una fase de calentamiento breve. Además, ofrece una Unidad de Enfriamiento para una inhalación agradable.



VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156



MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357